

**Eurovema**

Creates mobility and ergonomics.



## Monteringsanvisning

- Nedfellbart brett voksen/abc

**Eurovema**

Svennerudveien 34, 2016 Frogner

Tel./Phone 46 30 19 39

info@eurovema.no | www.eurovema.no


## MONTERING AV NEDFELLBART BRETT VOKSEN/ABC




- 1) Begynn med å løfte armstøtten ut av breddejusteringen.



- 2) Sett inn brettfestet på høydejusteringen.

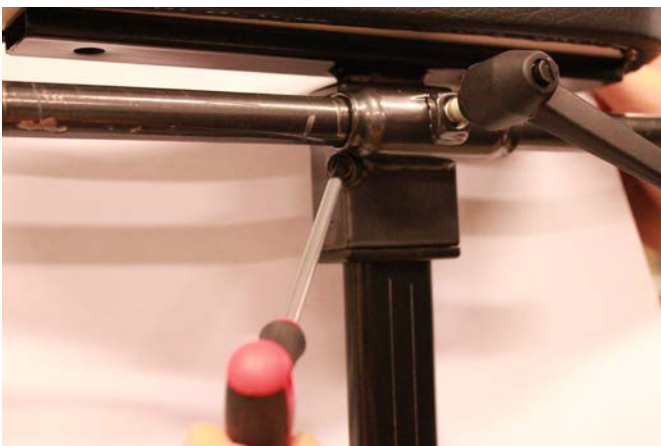

- 3) Når brettet sitter i ønsket høyde, strammer du sperreskruen med sekskantnøkkel nummer 4.

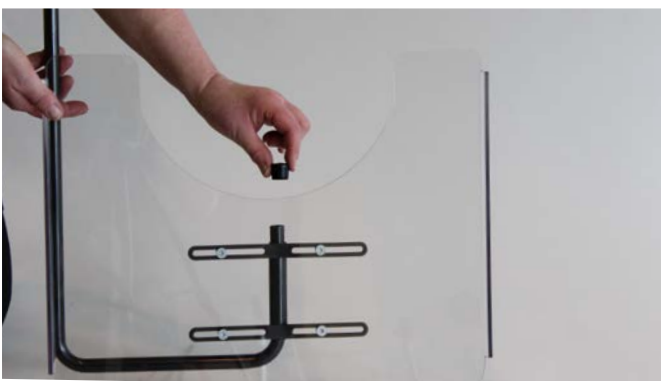

- 4) Tre stålrøret inn i brettfestet og sett endestykket på plass.




- 5) Sett brettet inn i festet på armstøtten.



- 6) Dra i spaken for å låse brettet i ønsket posisjon.



- 7) Sett endestykket på plass.

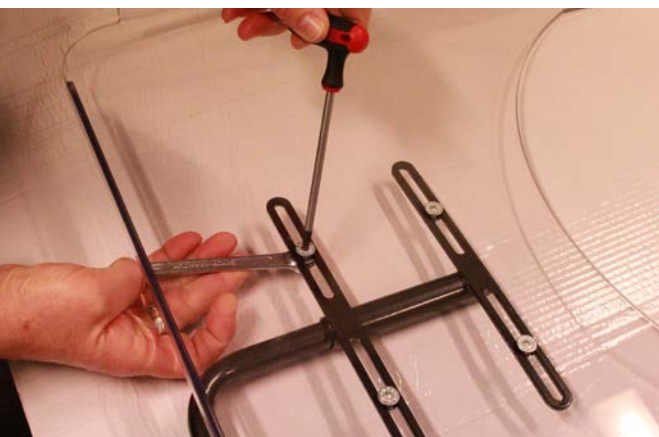

- 8) Hvis du vil justere brettet sidelengs, bruker du sekskantnøkkel nummer 4 til skruen og fastnøkkel nummer 10 til mutteren.



# *Eurovema*

Creates mobility and ergonomics.

Svennerudveien 34, 2016 Frogner  
Tel./Phone 46 30 19 39 | [info@eurovema.no](mailto:info@eurovema.no) | [www.eurovema.no](http://www.eurovema.no)